

Datafiche

Rev. 02 van 06/02/2020 - Mod. 73-A8_NL


CS PLUS 10



ALGEMENE GEGEVENS

Wegwerpcontainer voor scherpe en snijdende voorwerpen. Model ontworpen voor de verwijdering van bijzonder lang afval (thoraxdrains, klemmen en biopsienaalden...)

- ▶ **Materiaal:** Plastic materiaal 100% nieuw polypropyleen
- ▶ **Kleur:** Geel lichaam en rood deksel om de gevaarlijke inhoud te signaleren. Materialen gekleurd met masterbatch zonder zware metalen en cadmium. Materialen voldoen aan REACH
- ▶ **Vorm:** Vierkante basis
- ▶ **Gewicht:** 594 g
- ▶ **Maximale belasting:** 5000 g
- ▶ **Nominale capaciteit:** 10,00 L
- ▶ **Werkelijke capaciteit:** 9,35 L
- ▶ **Nuttige capaciteit:** 7,90 L
- ▶ **Externe afmetingen:** 220x220x325 H mm (deksel gemonteerd)

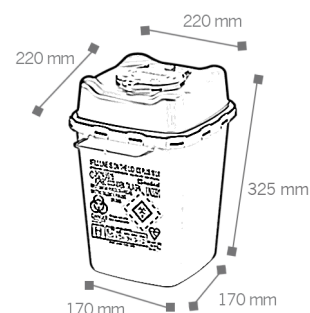

LOGISTIEKE GEGEVENS:

- ▶ **Stuks per doos** 33 (lichaam en deksel niet gemonteerd)
- ▶ **Afmetingen karton:** 79x60x48 H cm
- ▶ **Stuks per pallet:** 264 pcs.
- ▶ **Palletafmetingen:** 120x80x204 H cm

CERTIFICERINGEN:

- ▶ Voldoet aan AFNOR NF X-30-511
- ▶ Voldoet aan NF Mark
- ▶ Voldoet aan ADR -UN goedgekeurd
- ▶ Voldoet aan ISO 23907-1 - Kite Mark
- ▶ Voldoet aan TRBA 250

INSTRUCTIES

► Dekselmontage:

Plaats de opening van het deksel boven het etiket en druk stevig op de tegenoverliggende hoeken door op alle verbindingen te klikken en daarna op de tegenoverliggende zijden.



► Voorlopige sluiting:

Laat het deksel zakken terwijl u de tong op «1PROV» houdt en druk vervolgens op de tong om de rand te blokkeren

► In dit stadium is de sluiting voorlopig



► Definitieve sluiting:

Plaats het deksel in voorlopige sluiting en druk stevig op de twee centrale «1 DEF» en daarna op de «2 DEF». In dit stadium is de sluiting definitief.



► Naalden verwijderen:

Gebruik het "V"-verwijderingsapparaat om naalden en spuiten te scheiden

Gebruik het "marguerite"-apparaat om de insulinepen los te draaien



► **Houders:**

Wandtrolley beugel met grijpers



VEILIGHEIDSINFORMATIE:

- Gebruik het product alleen met het juiste deksel
- Gebruik het product niet voordat het deksel is aangebracht
- Probeer geen objecten aan te raken die zich al in de container bevinden
- Respecteer het aangegeven vulpeil: max. 85% van de werkelijke capaciteit
- Probeer de container niet te openen als ze eenmaal definitief en onomkeerbaar is verzegeld
- Container te verwijderen volgens de bestaande wet
- Volg de gebruiksaanwijzing om de veiligheid van de container te garanderen
- Gebruik de handvatten om de container te verplaatsen

VOORDELEN:

- Deksel voorzien van veilige, definitieve sluiting
- Gemakkelijk te gebruiken
- Bestendig tegen naalden en snijdende voorwerpen
- Handvatten beschikbaar
- Deksel voorzien van naaldverwijderaars
- Geschikt om te autoclavieren (voldoet aan NFX 30-511 zelfs na sterilisatie)
- Maximaal vulniveau aangegeven
- Meerdere houders beschikbaar
- Onomkeerbare definitieve sluiting