

Datafiche

Rev 00 van 10/05/2022 - Mod. 74-A9-NL


CS FLAP 7B



ALGEMENE GEGEVENS

Wegwerpcontainer voor scherpe en snijdende voorwerpen. Model ontworpen voor de verwijdering van bijzonder lang afval (thoraxdrains, klemmen en biopsienaalden...)

- ▶ **Materiaal:** Plastic materiaal 100% nieuw polypropyleen
- ▶ **Kleur:** Geel lichaam en rood deksel om de gevaarlijke inhoud te signaleren. Materialen gekleurd met masterbatch zonder zware metalen en cadmium. Materialen voldoen aan REACH
- ▶ **Vorm:** Vierkante basis
- ▶ **Gewicht:** 440 g
- ▶ **Maximale belasting:** 3,30 kg
- ▶ **Nominale capaciteit:** 7,00 L
- ▶ **Externe afmetingen:** 170 x 170 x 400H mm (coperchio montato)

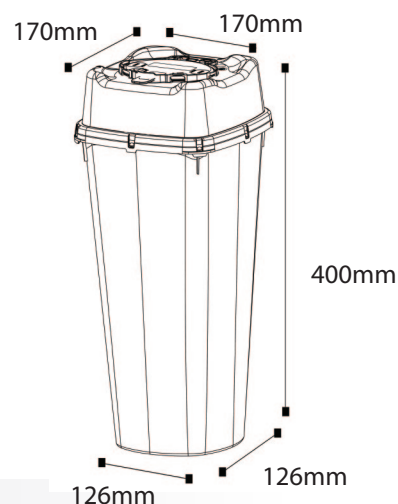

LOGISTIEKE GEGEVENS

- ▶ **Stuks per doos:** 27 (corpo e coperchio non assemblati)
- ▶ **Afmetingen karton:** 79,5x40x36,5 H cm
- ▶ **Stuks per pallet:** 486 pz.
- ▶ **Palletafmetingen:** 120x80x231 H cm


CERTIFICERINGEN:

- ▶ Voldoet aan ADR - UN goedgekeurd

INSTRUCTIES

► Dekselmontage:

Plaats de opening van het deksel boven het etiket en druk stevig op de tegenoverliggende hoeken door op alle verbindingen te klikken en daarna op de tegenoverliggende zijden.

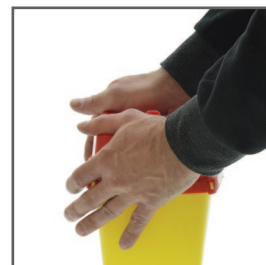

► Voorlopige sluiting:

Laat het deksel zakken terwijl u de tong op «1PROV» houdt en druk vervolgens op de tong om de rand te blokkeren

► In dit stadium is de sluiting voorlopig



► Definitieve sluiting:

Plaats het deksel in voorlopige sluiting en druk stevig op de twee centrale «1 DEF» en daarna op de «2 DEF». In dit stadium is de sluiting definitief.



► Naalden verwijderen:

Gebruik het "V"-verwijderingsapparaat om naalden en spuitpen te scheiden

Gebruik het "marguerite"-apparaat om de insulinepen los te draaien

Scalpelmesjes en snijdende voorwerpen



GEBRUIK:

- ▶ Sluit tijdens gebruik de dop in voorlopige sluitstand
- ▶ Sluit definitief zodra deze vol is
- ▶ Grote opening om het weggooien van scalpels, reageerbuizen, enz. te vergemakkelijken
- ▶ Geschikt om te autoclaveren op 134 °C gedurende 18 minuten
- ▶ Eenmaal gevuld, moeten de containers worden afgevoerd d.m.v. verbranding of volgens de nationale voorschriften

Houders:

Wandtrolley beugel met grijpers



VEILIGHEIDSINFORMATIE:

- ▶ Gebruik het product alleen met het juiste deksel
- ▶ Gebruik het product niet voordat het deksel is aangebracht
- ▶ Probeer geen objecten aan te raken die zich al in de container bevinden
- ▶ Respecteer het aangegeven vulpeil: max. 85% van de werkelijke capaciteit
- ▶ Probeer de container niet te openen als ze eenmaal definitief en onomkeerbaar is verzegeld
- ▶ Container te verwijderen volgens de bestaande wet
- ▶ Volg de gebruiksaanwijzing om de veiligheid van de container te garanderen
- ▶ Gebruik de handvatten om de container te verplaatsen

VOORDELEN:

- ▶ Deksel voorzien van veilige, definitieve sluiting
- ▶ Gemakkelijk te gebruiken
- ▶ Bestendig tegen naalden en snijdende voorwerpen
- ▶ Deksel voorzien van naaldverwijderaars
- ▶ Geschikt om te autoclaveren
- ▶ Maximaal vulniveau aangegeven

- ▶ Onomkeerbare definitieve sluiting

KLEPSYSTEEM

- ▶ Maximale veiligheid: tijdens gebruik (bij tijdelijke opening), bij onbedoeld kantelen, blokkeert het klepsysteem de lekkage van voorwerpen die zich al in de container bevinden.

